

カチャットチェア ロングレバー 取付説明書

この度はカチャットチェア90用ロングレバーをご購入頂きありがとうございます。
末永く安全にお使い頂きます為、本説明書を必ずお読み頂き正しい取付とご使用方法をお守り頂きます
様よろしく願いたします。 **必要工具 13mmスパナ(付属していません)**

- ① キズが付かない様に毛布などを敷いて台の上などに逆さまにします。




- ② 既存のレバーを回してはずします。



- ③ ロングレバーをネジこみます。
その際、**10mm～15mm(5回転)**の範囲でネジこんで下さい。
スパナで固定ナットAを軽めに締めて仮締めします。

- ④ この状態でレバーを使いやすい角度に調整します。
この時、ロングレバーが肘掛け等に接触していないことをご確認下さい。
角度が決まったら、固定ナットA、緩み止め用ナットBの順にスパナを使ってしっかり締めて完成です。

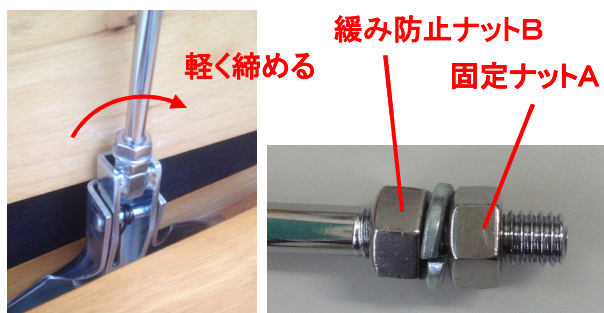

取扱い方法

- 椅子を回転させたい時
- ① 手でレバーを**外側へ**傾けながら、回りたい方向へ座面を**少し回転させます**。
 - ② 少し回りましたら**レバーから手を離し**、更に「カチャ！」と音がしてロックが掛かるところまで回して下さい。
これでロックができました。90度ごとにロックが掛かります。



注意点

- レバーは固定後、前後へは動かさないでください。レバーが緩んだり外れたりして危険です。
- レバーが緩んだ状態では使用しないで下さい。
- ロックが掛かっているか十分ご確認の上、立ち座り下さい。
- 破損、故障した状態でのご使用はお控えください。販売店、又は弊社までご連絡下さい。
- 本来のご使用目的、方法以外でのご使用はお控え下さい。

PL生産物賠償責任保険付



株式会社 オフィス・ラボ

〒791-1106 愛媛県松山市今在家4-9-32

TEL 089-958-2483

FAX 089-958-2109