

取付説明書 つえポン KS

取付け方

- 1、取り付ける場所を決めます。
走行や操作の支障にならないか確認し、
つえ受けがある場合はそこを起点につえを立てて
取付場所を決めます。
つえ受けがない場合、1ヶ所では安定しない場合は、
上下2ヶ所につえポンを取付けて下さい。




必要に応じ2ヶ所使用

- 2、取付クリップの角度を決めます。
クリップ固定ネジAを緩め回転クリップを外し、
取り付けるパイプに合わせ角度を決め、
再びネジで緩まない様にしっかり固定します。
ネジAを緩めず回すと破損の原因になります。



- 3、取付クリップをパイプに固定します。
取り付けるパイプの直径が20mm以上の場合は
ゴムスペーサーを外して取り付けて下さい。
取付けがきつい場合はゴムスペーサーを切って
調整してお試し下さい。
左右からしっかりパイプを挟み込み、**ギザギザ歯をなるべく深くかみ合わせます。**
力が入りにくい場合はプライヤーなどを使って
しっかり固定します。

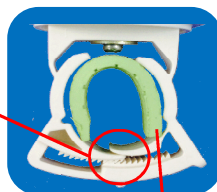

角度を決めて固定

取付完成

- 4、ぐらつきなどがいないか確認して取付完了です。

取付説明書 つえポン KS

取付け方

- 1、取り付ける場所を決めます。
走行や操作の支障にならないか確認し、
つえ受けがある場合はそこを起点につえを立てて
取付場所を決めます。
つえ受けがない場合、1ヶ所では安定しない場合は、
上下2ヶ所につえポンを取付けて下さい。



必要に応じ2ヶ所使用

- 2、取付クリップの角度を決めます。
クリップ固定ネジAを緩め回転クリップを外し、
取り付けるパイプに合わせ角度を決め、
再びネジで緩まない様にしっかり固定します。
ネジAを緩めず回すと破損の原因になります。



- 3、取付クリップをパイプに固定します。
取り付けるパイプの直径が20mm以上の場合は
ゴムスペーサーを外して取り付けて下さい。
取付けがきつい場合はゴムスペーサーを切って
調整してお試し下さい。
左右からしっかりパイプを挟み込み、**ギザギザ歯をなるべく深くかみ合わせます。**
力が入りにくい場合はプライヤーなどを使って
しっかり固定します。




取付完成


- 4、ぐらつきなどがいないか確認して取付完了です。

取り外し方

- 1、ギザギザ歯の所にコインを差し込みひねって下さい。
- 2、外れにくい場合は、B ツメ部を持ち上げながらコインをひねって下さい。

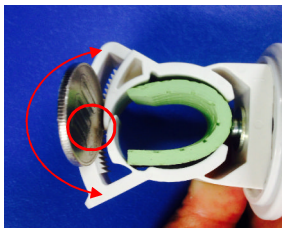

ここにコインを差し込み左右にひねる

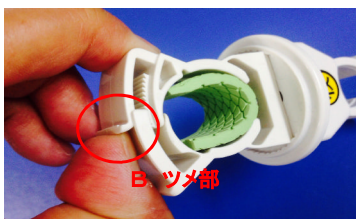

外れにくい場合は B ツメ部を持ち上げながら
コインをひねって下さい。



お問い合わせ

株式会社 オフィス・ラボ


〒791-1106

愛媛県松山市今在家4-9-32


電話 089-958-2483 FAX 089-958-2109

取り外し方

- 1、ギザギザ歯の所にコインを差し込みひねって下さい。
- 2、外れにくい場合は、B ツメ部を持ち上げながらコインをひねって下さい。

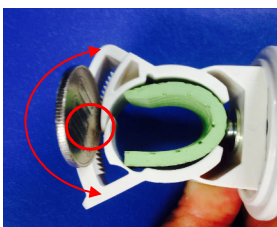

ここにコインを差し込み左右にひねる

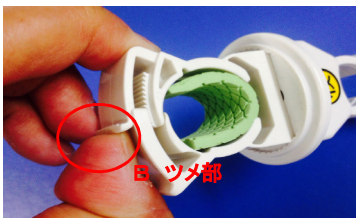

外れにくい場合は B ツメ部を持ち上げながら
コインをひねって下さい。



お問い合わせ

株式会社 オフィス・ラボ

〒791-1106

愛媛県松山市今在家4-9-32

電話 089-958-2483 FAX 089-958-2109