


楽々立ち上がり、自立を目指す

ラクタッチ チェア

LT-141 BR/DK

カラー：MGR(ミントグリーン)・LIV(ライトアイボリー)・RPK(ローズピンク)

フレームカラー：BR(ブラウン)・DK(ダーク)

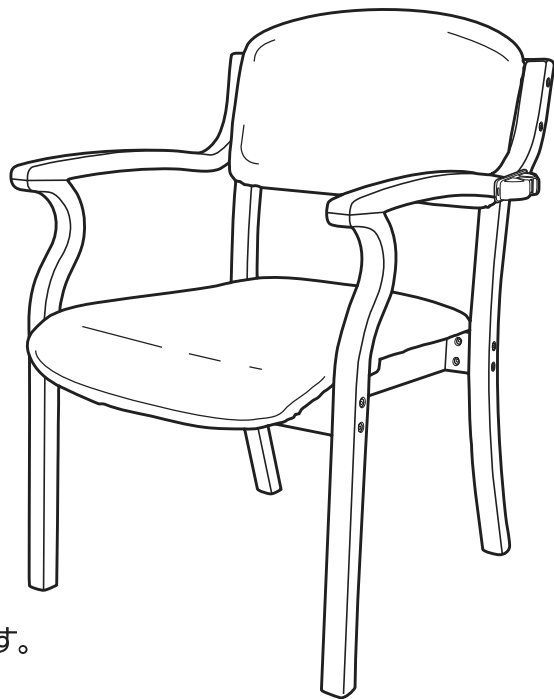

この度は当社の製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

下記の説明書をよくお読みになりご使用ください。

この説明書はいつでも見られるように大切に保管してください。

また、この商品を第三者に譲渡されるときには

必ずこの説明書を一緒にお渡しください。

本製品は、特徴的なデザインの「楽立ち肘掛」を採用し
しっかり握れる肘掛けを支えにして立ち上がりやすくなっています。

さらに、抗菌、防汚、耐アルコール、難燃機能を施しています。

高齢者や障害者の自立と、介護される方の負担軽減の

お役に立てますことを願って開発いたしました。

未永くご活用ください。

品名	ラクタッチ チェア	品番	LT-141 BR/DK
寸法	W535・D565・H805/mm	付属品	六角レンチ・脚裏フェルト
	座面高 415・肘高 600/mm		杖ホルダー「つえポン S」/説明書
構造部材	フレーム部：ラバーウッド 成型合板	耐荷重	80kg
表面加工	フレーム部：ラッカー塗装	積み重ね	3脚まで
クッション材	ウレタン	生産国	ベトナム
張地	PVC 合成皮革		
張地機能	抗菌、防汚、耐次亜塩素酸、準耐アルコール		

ご使用になる前に

- 製品に破損個所がないか点検してください。割れ、ヒビ等の破損個所が見られた場合すぐに使用を中止してください。
- ネジが緩んだ状態で使用しないでください。
- ネジが緩んだ場合は必ず付属の六角レンチで締めてご使用ください。
- 床のキズを防止するため、必要な方は付属の脚裏フェルトをご利用ください。
- 必要に応じて杖ホルダー「つえポン S」を取り付けてご使用ください。

重要事項

- 椅子本来の目的以外で使用せず、正しい方法でご使用ください。
- 必ず室内でご使用ください。
- 配送中や使用しているうちにネジに緩みが発生しグラつくことがありますので定期的にネジを締め直してください。
- 椅子に座った状態で、椅子を持ち上げたり、移動はしないでください。転倒や椅子の破損につながる場合がありますのでお控えください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 積み重ねる際は座面に跡がつくので保護材を敷いて積み重ねてください。

安全のために

以下の事項をお守りください。怪我や、製品の破損、家財の損傷の原因になる事があります。

椅子に乗ったり、踏み台にしないでください。

転倒・落下によりケガの原因となります。



4脚以上の積み重ねは、おやめください。

崩れたり・落下によりケガの恐れや椅子が損傷する場合があります。



使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。守らないで破損・事故を起こしたり、ケガを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

室内用家具 用途以外の目的には使用しないでください。



●火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。

●思わぬ事故や破損、ケガの原因となりますので、以下のことにご注意ください。



●必ず水平で安定した場所に設置してください。

●お子さまがいたずらしないようご注意ください。

●乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。



●移動する際は、のせてあるものをすべておろしてください。

●フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。

●必ず耐荷重以内でご使用ください。

●一点に集中的に荷重がかからないように、できるだけ均一に置いてください。

●腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。

●直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。

●濡れたものや熱いものを置かないでください。

●シール、テープなどを貼らないでください。

●接着剤に含まれる有機溶剤(ホルムアルデヒド)が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。



●使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。

●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する保証は致しかねます。

●製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの仕方 永くお使いいただくために下記の事項をお守りください

●汚れを落とす際は、薄めた住居家具用合成洗剤で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。


●アルコール、ベンジン、漂白剤(次亜塩素酸)、みがき粉などは使用しないでください。

サービス・保証について 保証期間(ご購入の日より) ※一般使用状態での目安です。

PL 保険 (生産物賠償責任保険) 付

この製品の保証期間は通常の状態で使用された場合、ご購入から1年間と致します。保証期間内での故障、破損に関しましては無償にて修理、交換または代替え品への交換を保証させていただきます。

もっと笑顔に、ずっと笑顔で

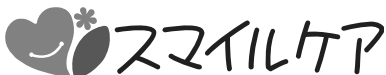

みんなで創る福祉家具のブランド

Produce by

株式会社 **オフィスラボ**

<https://officelabo.co.jp>

〒791-1106 愛媛県松山市今在家 4-9-32
TEL.089-958-2483 FAX.089-958-2109

